

Urimed[®] Vision

Uridom

Indikation

- Mandlig urininkontinens, periodisk eller kronisk

Egenskaber

- Huden kan ånde, ingen hudirritation eller allergiske reaktioner
- Nemt at påsætte
- Gennemsigtigt – mulighed for at observere huden
- Optimal komfort og sikkerhed
- Passer til alle gængse urinopsamlingsposer
- Til engangsbrug – kan anvendes op til 24 timer
- 'Short'-versionen kan anvendes af alle, og er også til mænd med en retraheret/kort penis

Produktbeskrivelse

- Selvklæbende uridom
- 100% silikone
- Latex-fri
- Fås i 5 størrelser fra Ø 25 mm til Ø 41 mm
- Fås i 2 længder og tre varianter:
 - **Kort:** 4,5 cm lang med klæberbredde 4,5 cm
 - **Standard:** 7,5 cm lang med klæberbredde 4,5 cm
 - **Ultra:** 7,5 cm lang med klæberbredde på 7,5
- Reservoir
- Kinkfrit
- Udløb kan tilsluttes gængse urinopsamlingsposer



Brugsvejledning

1. Vask penis og tør grundigt. Bør foretages 1 gang dagligt.
2. Anvend ikke creme eller pudder, da det forhindrer korrekt vedhæftning til huden.
3. Fjern kønshår om nødvendigt.
4. Åbn pakken ved anbrudsmarkeringen.
5. Kun ved Kort og Ultra model - For at fjerne plastik indstikket, klem på uridomet øverst ved den hvide kegle og træk tilbage for at løsne den.
6. Træk ikke for huden tilbage.
7. Rul det selvklæbende uridom ud over penis. Der bør være 1-2 cms afstand mellem glans og enden af uridomet.
8. Tryk forsigtigt på uridomet for at sikre fastklæbning til huden.
9. For at fjerne uridomet: Rul forsigtigt uridomet af penis - vask penis og tør grundigt. Fingrene kan evt. fugtes først, da dette kan lette aftagningen.

Måleskabeloner/guides til valg af korrekt størrelse kan rekvireres.

Urimed Vision Standard, længde 7,5 cm, klæber 4,5 cm 30 stk./æske					
Diameter	25 mm	29 mm	32 mm	36 mm	41 mm
Varenr.	IH2525A	IH2529A	IH2532A	IH2536A	IH2541A
Urimed Vision Kort længde 4,5 cm, klæber 4,5 cm 30 stk./æske					
Diameter	25 mm	29 mm	32 mm	36 mm	41 mm
Varenr.	IH4525A	IH4529A	IH4532A	IH4536A	IH4541A
Urimed Vision Ultra, længde 7,5 cm, klæber 7,5 cm 30 stk./æske					
Diameter	25 mm	29 mm	32 mm	36 mm	41 mm
Varenr.	IH3525A	IH3529A	IH3532A	IH3536A	IH3541A

