



OMNI[®]
ET LIV BETYDER ALT



FULD FLEKSIBILITET BETYDER STABILITET.



Hvorfor nøjes med mindre? OMNI indeholder alle CRRT og antikoagulationsfunktioner. Med OMNIset kan du skifte mellem forskellige behandlinger eller fortyndingstilstand.

Du opnår fuld fleksibilitet og kontrol

Behandlingstilbud

SCUF

CVWH (Pre - Post - Pre/Post - Post/Post)

CVHDF

CVHDF

TPE

CO₂ fjernelse

Antikoagulationsmetode

Heparin

Heparin

Heparin Citrat


Heparin Citrat

Heparin

Heparin



360° porteføljen giver dig frihed og muligheder for at tilbyde dine patienter enhver form for behandling, når det er nødvendigt – uanset lidelsens sværhedsgrad. Som en global ledende virksomhed på sit felt, står B. Braun for et højt niveau af kvalitet og driftssikkerhed.

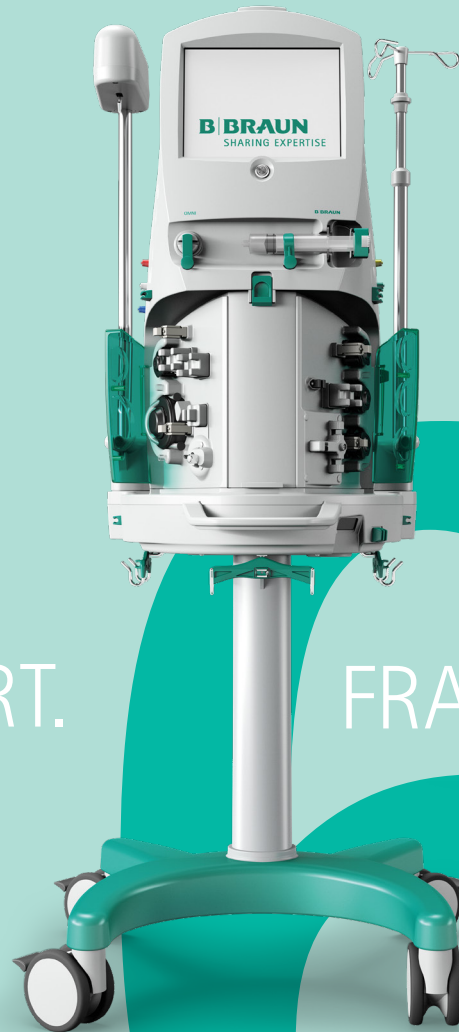

GENNEMFØRT.

FRA ALLE SYNSVINKLER.



BANEBRYDENDE DESIGN.

Omni er mobil og nem at flytte på en Intensiv afdeling, takket være dens kompakte størrelse og lave vægt. Med OMNI er det muligt at mobilisere den intensive patient, mens OMNI er koblet til. Omni understøttes af et 30 minutters back-up-batteri.



Den slankeste og letteste enhed på markedet

OMNI's unikke design gør den til den mest kompakte enhed af sin slags på markedet - en stor fordel på Intensive afdelinger.





SÅ LET SOM 1, 2, 3 ...



Oplev lethedens ved den komplet tilsluttede Plug & Play OMNIsets.

1. Skan stregkoden, og pak sættet ud.
2. Slut sættet til OMNI.
3. Automatisk priming:
Klar til behandling efter 10 minutter.

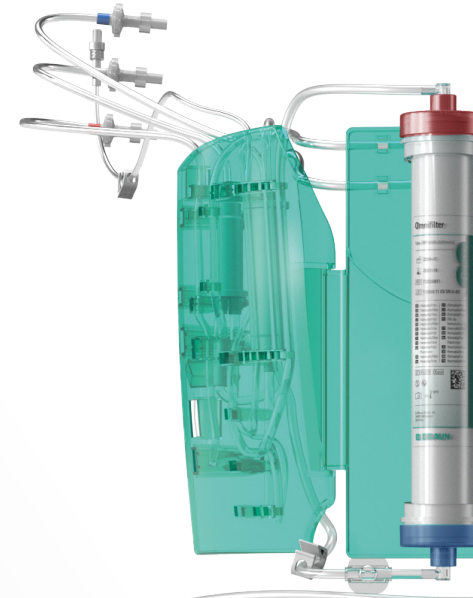

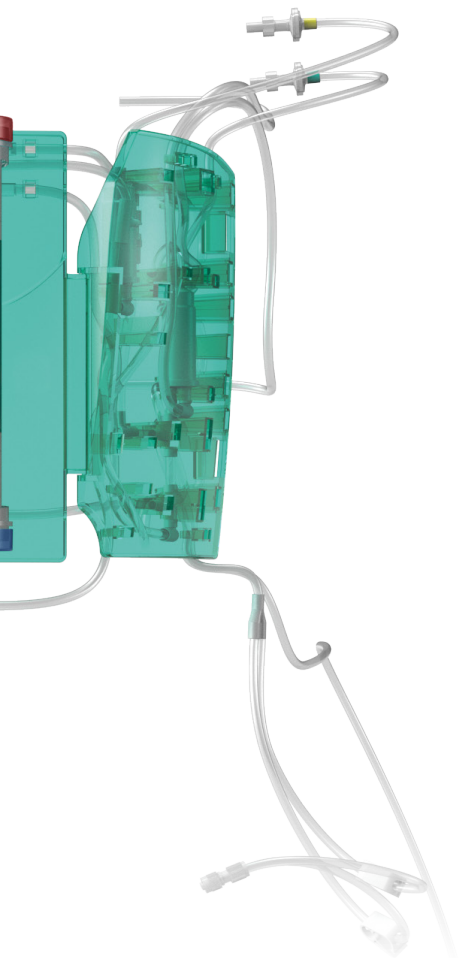

Komplet tilsluttede Plug & Play OMNIsets[®]
OMNIset er designet til at reducere arbejds-
pres hos personalet. Hurtig og nem opsætning
med guidede brugeropsætninger gør det nemt
for personalet at forberede OMNI maskinen
sikkert.




Nem opsætning med OMNIset[®] *

Det færdigmonterede Omniset og de lette trin-for-trin-instruktioner på skærmen,
gør OMNI til en af de hurtigste og letteste maskiner at klargøre på markedet.

*OMNIset Set version 3.00 (eller højere)

"GET IN TOUCH"

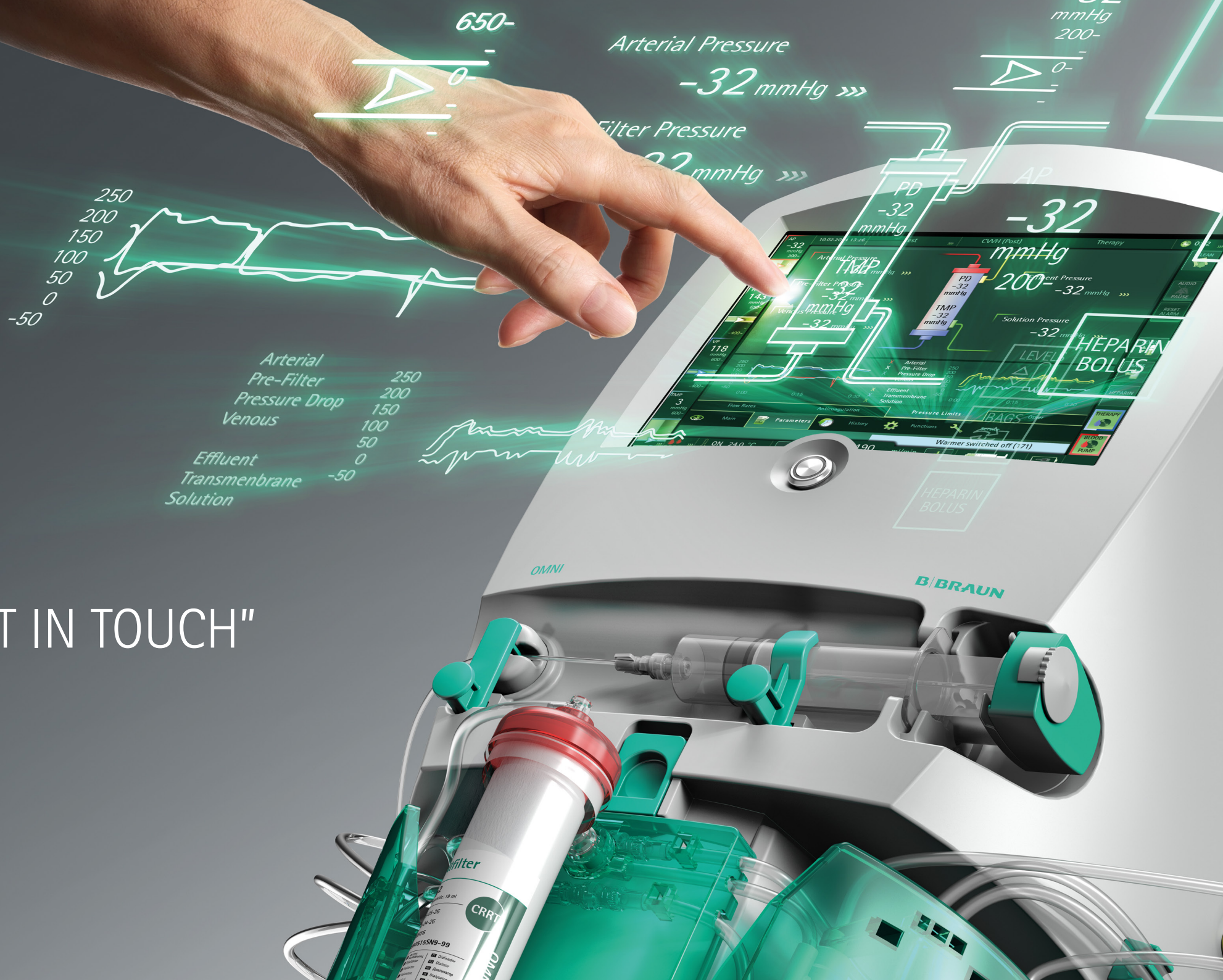




Den krystalklare touchskærm giver et hurtigt overblik over de vigtigste parametre der er brug for inden for CRRT og gør det let at handle hurtigt og hensigtsmæssigt i nødsituationer.

Touchskærm

Det klare, lynhurtige display og brugerinterfacet hjælper dig med at udføre CRRT-behandling sikkert. En omfattende fejlfindingsguide hjælper dig til hurtig afhjælpning af problemet. Den unikke pauseskærm er synlig fra op til 10 meters afstand.

360° statuslampe

Placeret øverst på OMNI og synlige fra alle vinkler ses 3 forskellige lamper. De er forbundet til lydalarmer og hjælper brugeren med at følge behandlingen, udskifte poser, - heparin eller kalciumpøje, eller foretage fejlfinding.

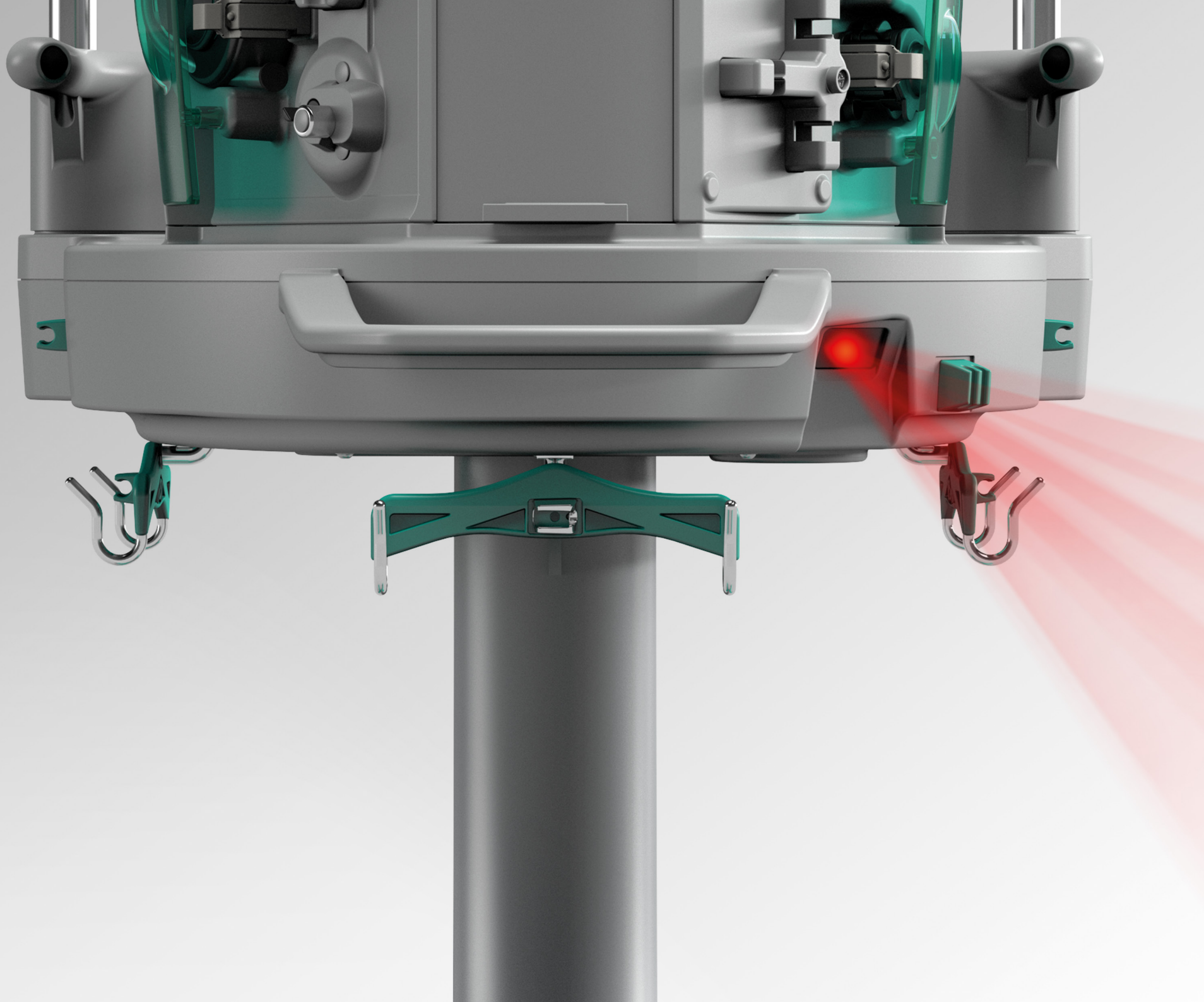

DEN NYE FØRSTEKLASSES SIKKERHED.



På intensiv handler det om at gøre det rigtige. OMNI giver brugerne mulighed for at opnå et højt niveau af sikkerhed.



System med to kanaler

Det dobbelte kanalsystem, herunder kontrol- og beskyttelseskanalerne, giver en optimal sikkerhed og nøjagtighed for CRRT.

Stregkodeskanner

Korrekt sætvalg bekræftes med stregkoder, så potentielle opsætningsfejl og brug af filtre, der har overskredet udløbsdatoen, undgås.

Reservebatteri

En reservebatterikapacitet på op til 30 minutter varetager patientens sikkerhed i nødsituationer, og gør det muligt at transportere patienten uden stop.

Trevejsklemmer til skift af behandling/fortynding

Akutte ændringer i patientens tilstand skal omgående håndteres. Trevejs klemmesystemet gør, at brugeren kan skifte mellem behandlings- og fortyndingsmulighederne med det samme sæt til enhver tid.

Behandlingshistorik

Historikfunktionen giver brugeren mulighed for at gendanne de sidste 10 patientjournaler.


OMNIset® *

Varemærkenavn	Overfladeareal
OMNIset	0,8m ² - 1,2m ² - 1,6m ²
OMNIset Pro	0,8m ² - 1,2m ² - 1,6m ²
OMNIset TPE	0,5m ² - 0,7m ²
OMNIset L Valideret i op til 96h	1,6m ²
OMNIset Plus	1,6m ²
OMNIset ECCO2R	1,6m ²

*OMNIset Set version 3.00 (eller højere)

OMNIbag®

Varemærkenavn	Størrelse
OMNIbag®	7000 ml standard spildevandspose
OMNIbag®	7000 ml spildevandspose med drænfunktion

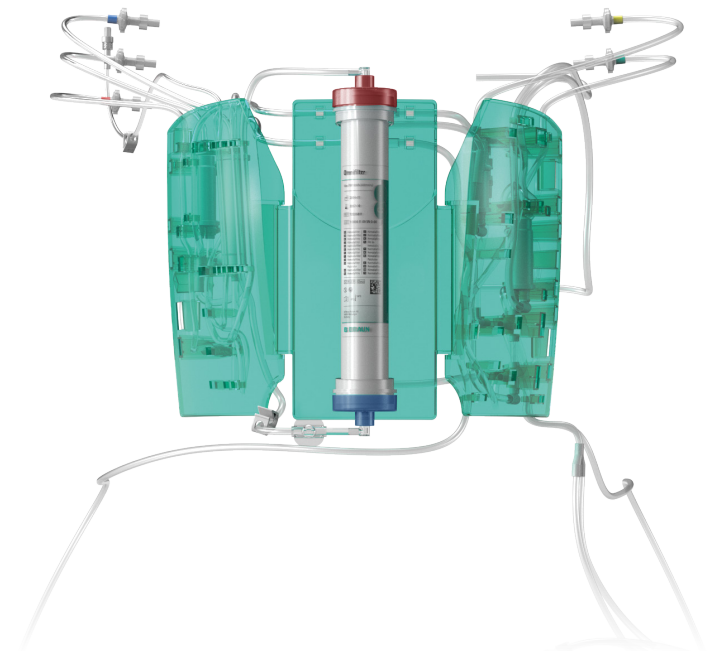

Duosol®

Na ⁺ mmol/l	K ⁺ mmol/l	Ca ⁺⁺ mmol/l	Mg ⁺⁺ mmol/l	Cl mmol/l	HCO ₃ ⁻ mmol/l	GluKose mmol/l	Theoret. osmolaritet mOsm/l
140	0	1,5	0,5	109	35,0	5,6	292
140	2	1,5	0,5	111	35,0	5,6	296
140	4	1,5	0,5	113	35,0	5,6	300

Emballagetype: 1 kasse indeholder 2 poser, pallesamling: 50 kasser



B. BRAUN BICARBONAT CALCIUMFRI OPLØSNING

Na ⁺ mmol/l	K ⁺ mmol/l	CA ⁺⁺ mmol/l	Mg ⁺⁺ mmol/l	Cl mmol/l	HCO ₃ ⁻ mmol/l
136	4	0	0,75	116,5	25
136	2	0	0,75	114,5	25

Emballagetype: 1 kasse indeholder 2 poser, pallesamling: 50 kasser

CITRATOPLØSNING (CITRASOL 4 %, 2 LITER)

Na ⁺ mmol/l	Citrat mmol/l	pH	Theoret. osmolaritet mOsm/l
404,6	136,4	~ 7	539,5

Emballagetype: 1 kasse indeholder 5 poser



SAMMENSÆTNING AF BRUGSKLAR OPLØSNING

B Braun Medical A/S | Avitum | Dirch Passers Allé 27, 3.sal | 2000 Frederiksberg | Denmark
Tlf. +45 3331 3141 | www.bbraun.com



Lær mere om fordelene ved den nye OMNI og vores andre innovative produkter.

For yderligere oplysninger kan du downloade app'en ved at skanne QR-koden nedenfor.