

Ecoflac[®] Connect

Håndteringsanbefalinger

Lukket nålefrit system til Lægemedielblanding



Folien fjernes fra den ene sterile port. Ecoflac[®] Connect påsættes, så spiken går lige igennem porten.



Nu sættes hætteglaset lige på, INGEN TWIST AF HÆTTEGLAS .



Væsken presses fra beholder til hætteglas først med et kontinuerligt tryk, for at åbne ventilen, derefter med gentagne tryk. Når medicinen er opløst trykkes væsken tilbage til beholderen.



Nu fjernes folien fra den anden sterile port og et infusionsæt tilkobles.

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

B Safe B | BRAUN

Ecoflac® Plus
100 og 250 ml



Ecoflac® Connect



Ecoflac® Mix



Mini-Spike



Vasofix® Safety



Intrafix® SafeSet

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE