

Uro-Tainer® Mono

Til forebyggelse og bekæmpelse af inkrustationer i/på permanente katetre

Indikation

- Tilstopning af permanente top- og blærekatetre pga. bakterielle inkrustationer/forkalkninger i og på katetret

Egenskaber

- Virker profylaktisk mod tilstopning af katetret
- Forlænger katetrets levetid
- Færre kateterskift og mindre risiko for kontaminering
- Minimerer traumer og smerter ved fjernelse af kateteret
- Er steril og klar til brug

Produktbeskrivelse

- PVC-frit lukket, sterilt og sikkert system
- Suby G (citronsyre 3,23 %) anbefales som profylaktisk hjælpemiddel, hvis patienten er defineret som 'blokker' *
- Solutio R (citronsyre 6 %) anbefales, hvor der trods brug af Suby G fortsat er stop af katetret
- Solutio R kan benyttes i forbindelse med kateterskift
- De to opløsninger kan kombineres

Inkrustationer

- Skyldes at bakterier i urinen, oftest bakterien proteus, producerer enzymet urease. Dette øger urinens pH-værdi, hvilket medfører en udfældning af magnesium- og calciumsalte. Det betyder kalkbelægninger/ inkrustationer i og på kateteret og dermed stop af dette.

* 'Blokker' = to eller flere tilstoppede katetre over 6 uger

Uro-Tainer® er en nødvendig forudsætning for at sikre en optimal funktion af katetret



Skylleregime

Ved kateterstop hver/hver anden uge

Uro-Tainer® Suby G: 3-5 gange ugentligt i 2 uger.

Hvis kateterurinen herefter løber, som den skal, kan skyllefrekvensen eventuelt sættes ned.

Hvis der fortsat er kateterstop pga. inkrustationer, sættes skyllefrekvensen op. Alternativt skylles med Uro-Tainer® Mono Solution R i stedet for.

Følg altid de lokale instrukser. Kontakt evt. kontinenssygeplejersken.

Brugsvejledning

Se bagsiden af dette datablad eller gå ind på B. Brauns danske hjemmeside (www.bbraun.dk urologi/inkontinens, skyllevæsker og så Uro-Tainer® Twin) for at se to videoer, der gennemgår den praktiske håndtering samt den teoretiske viden om Uro-Tainer®.

OBS!

- Instillation med Solutio R kan i få tilfælde give en let svien. Der kan evt. efterskylles med NaCl.
- Hold pause med Uro-Tainer®, hvis og mens der behandles for en blærebetændelse.

| Varenr. | Produktnavn | Salgsenhed pr. æske | Salgsenhed pr. karton |
|---------|---|---------------------|-----------------------|
| FB99839 | Uro-Tainer® Suby G, 100 ml, 3,23 % citronsyre | 10 stk. | 60 stk. |
| FB99841 | Uro-Tainer® Solutio R 100 ml, 6 % citronsyre | 10 stk. | 60 stk. |

Uro-Tainer® Mono

Til vedligeholdelse af permanente urinkatetre



1. Varm Uro-Tainer® i lunkent vand (valgfrit). Desinficér dine hænder grundigt. Hvis muligt, bær engangshandsker.



2. Fjern plastikindpakning og tag Uro-Tainer® ud.



3. Luk Uro-Tainer® slangen med plastikklemmen.




4. Drej og træk hættten af uden at røre den sterile konnektor.



5. Åbn plastikklemmen og lad enkelte dråber af Uro-Tainer® væsken løbe ind gennem katetret for at fjerne eventuelle luftbobler.



6. Indsæt Uro-Tainer® konnektoren ind i katetret og lad Uro-Tainer® flyde ind i katetret som vist i step 7.

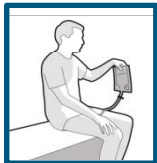

7. Hold Uro-Tainer® over blæreniveau, åbn plastikklemmen og lad væsken løbe ind gennem katetret. For at undgå gener i blæren, tving eller pres ikke væsken ind, lad i stedet væsken løbe ind med tyngdekraftens hjælp. Skil ikke Uro-Tainer® posen fra katetret.



8. Når væsken er løbet ind, vent 5 minutter før du lader væsken løbe ud igen. Hold posen under blæreniveau, så væsken kan løbe tilbage i posen. Når Uro-Tainer® posen er fyldt op, lukkes klemmen og posen fjernes fra katetret. Fastgør drænposen og kassér Uro-Tainer® efter brug. Desinficér dine hænder. Kun til engangsbrug.

Må ikke genanvendes. Uro-Tainer® er kun til engangsbrug. Kasseres korrekt efter brug.