

Gør livet lettere – Easypump® II

Elastomerisk pumpe til korte og lange behandlinger




April 2020

Information til
patienten

Produkt beskrivelse

Easypump® II

- ① Hætte: Sikker beskyttelse af påfyldningsporten
- ② Blød yderskal: Beskytter den elastomeriske membran
- ③ Elastomerisk membran: Fungerer som trykkilde og opbevaring af medicin
- ④ Regulator: Regulerer infusionshastighed der sikrer konstant og nøjagtig dosis
- ⑤ Klemme: For start og stop af infusion
- ⑥ Filter: Fjerner luft og partikler
- ⑦ Sikker patient tilslutning

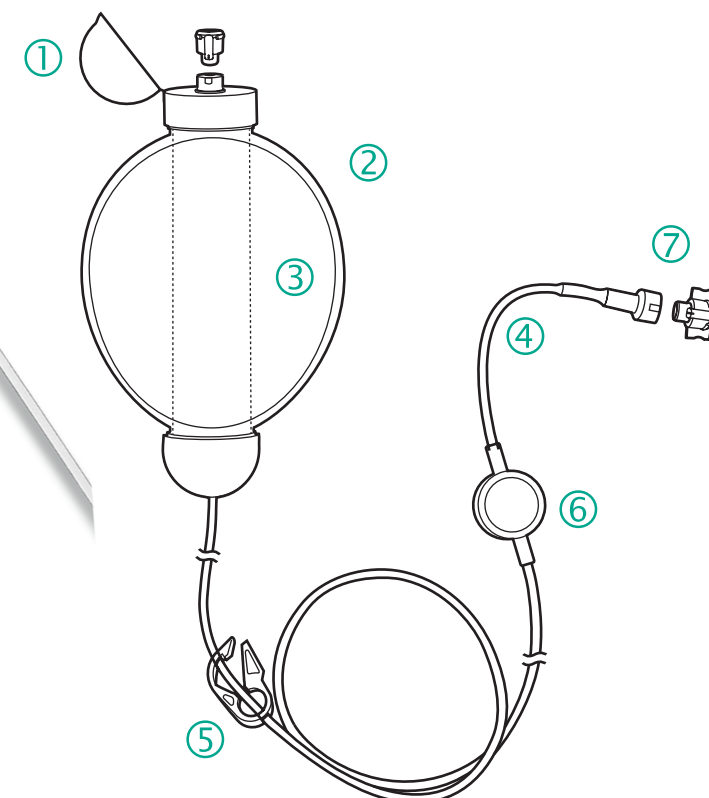

Principperne ved Easypump® II

Easypump® II er en elastomerisk infusionspumpe til indgivelse af medicin.

Principperne ved Easypump® II er enkle:
En elastomerisk ballon er fyldt med medicin, som skubbes gennem slangen.

En regulator regulerer infusionshastigheden og sikrer en konstant medicin infusion.

FAQ - Ofte stillede spørgsmål



Funktion - Hvordan ved jeg, om pumpen fungerer?

Den elastomeriske ballon vil gradvist blive mindre efterhånden som medicinen løber ind. Vær opmærksom på, at dette kan ske meget langsomt, så du vil muligvis ikke kunne se dette umiddelbart. Vær i øvrigt opmærksom, såfremt den elastomeriske ballon hurtigt bliver mindre, da løber medicinen for hurtigt ind. Du kan forsøge at ændre pumpens placering eller kontakte personalet på dit behandlingssted.

Hvordan ved jeg at behandlingen er slut?

Det er vigtigt, at du møder op på dit behandlingssted inden ballonen er tom, fordi dit drop/IV adgang kan stoppe til, hvis ikke denne skylles igennem og det kan da være nødvendigt at anlægge en ny adgang.



Rejse - Kan jeg rejse med fly, når jeg benytter en Easypump® II?

Ja, det kan du, men infusionshastigheden kan ændre sig. Kontakt din behandler, hvis dette er aktuelt.



Badning - Kan jeg tage et brusebad, når jeg benytter Easypump® II?

Ja, generelt er dette muligt. Sørg for at din IV-adgang er forsvarligt pakket ind, således at det ikke bliver vådt i forbindelse brusebad. Det er IKKE muligt at tage karbad, så længe du benytter Easypump® II



Sove - Vil Easypump® II briste, hvis jeg ved et uheld ligger på den?

Pumpen vil ikke briste under normale forhold.

Det anbefales dog, at pumpen ikke udsættes for et for højt tryk (f.eks. ved at sidde eller ligge på den). Pumpen skal være i niveau med din vandrette linje, når du sover, da medicinen vil løbe hurtigere ind, hvis pumpen ligger højere end dig og omvendt langsommere ind, hvis den ligger lavere end dig.



Miljø - Kan vejrforhold have indflydelse på min behandling (kan jeg f.eks. være udendørs)?

Du kan godt være udendørs. Det anbefales dog, at beskytte Easypump® II under tøjet i en bæltetaske.

Vejrforhold som f.eks. temperaturforandringer, direkte UV-lys, ekstrem høj luftfugtighed m.m. kan påvirke indløbet af medicinen. Kontakt din behandler vedrørende dine individuelle behov.

NB: Hvis du har mistanke om at din pumpe har været opbevaret for varmt og tømt sig for hurtigt, skal du kontakte afdelingen.

Eller oplever du at din pumpe ikke fungerer korrekt, skal du lukke den hvide klemme og kontakte afdelingen.



Materiale - Indeholder Easypump® II latex?

Nej. Easypump® II indeholder ikke latex.

Benyt Easypump® II hjemme



Forbliv mobil

Easypump® II er let og kan nemt medtages i en bæretaske. Easypump® II kræver hverken tyngdekraft eller strøm for at fungere.

Den er ideel til hjemmebehandling, så du stadig kan foretage dine normale aktiviteter.

NB: Din behandler vil informere dig om behandlingen og medicinen.



Sørg for ...

- at pumpen og tilslutningerne er tætte
- at klemmen er åben under behandlingen
- at slangen ikke er knækket eller blokeret
- at filteret ikke er tildækket
- at infusionsregulatoren hele tiden er i kontakt med huden
- at børn ikke leger med pumpen