

Flexima® Active, lukket med filter

med en unik elastisk hudklæber

Indikation

- Kolostomi

Egenskaber

- Patenteret elastisk hudklæber med mange fordele:
 - en behagelig bærekraft
 - stor fleksibilitet og god evne til at tilpasse sig hudkonturer
 - efterlader ikke klæberester på huden
 - giver god hudbeskyttelse
 - lille risiko for maseration
 - øjeblikkelig vedhæftning
 - mulighed for repositionering
 - sidder højt oppe på posen og giver dermed bedre komfort og diskretion
- Opklipbar klæber i str.:
 - mini: 15–45 mm
 - midi 15–50 mm
 - maxi 15–65 mm eller 15–80 mm
- Findes også med inspektionsvindue, der gør det muligt at observere stomien. Desuden kan det være en hjælp ifm. påsætning af posen.

Produktbeskrivelse

- 1-dels lukket stomipose med filter
- Blomsterformet elastisk hudklæber, der følger hudens konturer
- 5 forudstansede udgaver
- Findes i transparent og beige
- 3 posestørrelser: mini, midi og maxi




De unikke egenskaber ved Flexima® Active:



- ✓ En sikker, elastisk og smidig hudklæber

- ✓ Inspektionsvinduet giver mulighed for at observere stomien og gør påsætning nemmere

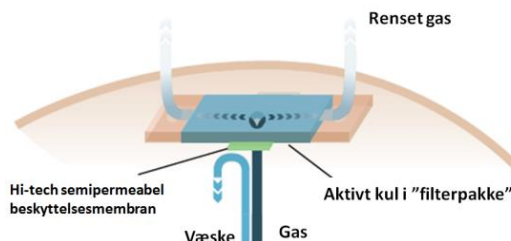

- ✓ Et sikkert filter som renser luften effektivt og minimerer risikoen for ballon-effekt

Påsætning af posen

Anbefaling

Stå op eller sid ned uden at trække i huden eller læne overkroppen bagud under påsætningen (dette strækker huden og kan betyde, at posen ikke sidder ordentligt).

Hjælp evt. påsætningen på vej ved at folde stomiposen. Dette kan give et bedre overblik, når posen skal sættes på.

Det er muligt at løsne klæberen og atter påsætte den, hvis man efter første forsøg ikke er helt tilfreds med resultatet.

Et godt tip til aftagning er at trække klæberen nedad i stedet for at trække udad i klæberen.


Undgå




At svaje ryggen



At trække i huden

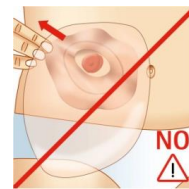

At trække i klæberen/posen

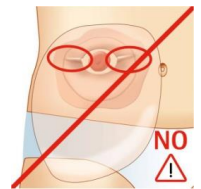

Dette kan medføre risiko for lækage, fordi klæberen laver folder

Følg tegningen



Påsætning



Aftagning

Flexima® Active, lukket med filter

Beige poser Varenr.	Transparente poser Varenr.	Varenr. med inspektionsvindue (beige)	Størrelse	Salgsenhed /æske
	4611115N	4612115N	Midi 15-50 mm	30 stk.
4610125N	-	-	Midi 25 mm	30 stk.
4610130N	-	-	Midi 30 mm	30 stk.
4610135N	-	-	Midi 35 mm	30 stk.
4610140N	-	-	Midi 40 mm	30 stk.
	4611380N	4612380N	Maxi 15-65 mm	30 stk.
	-	4612215N	Mini 15-45 mm	30 stk.