

Uro-Tainer® Twin

Forebyggelse og bekæmpelse af inkrustationer i/på permanente katetre

Indikation

- Tilstopning af permanente top- og blærekatetre pga. bakterielle inkrustationer/forkalkninger i og på katetret

Egenskaber

- Virker profylaktisk mod tilstopning af katetret
- Forlænger katetrets levetid
- Færre kateterskift og mindre risiko for kontaminering
- Minimerer traumer og smerter ved fjernelse af katetret
- Er steril og klart til brug

Produktbeskrivelse

- PVC-frit lukket, sterilt og sikkert system
- Uro-Tainer® Suby G (citronsyre 3,23 %) anbefales som profylaktisk hjælpemiddel, hvis patienten er defineret som 'blokker'*
- Uro-Tainer® Solutio R (citronsyre 6 %) anbefales, hvor der trods brug af Uro-Tainer® Suby G forsat er stop af katetret
- Uro-Tainer® Solutio R kan benyttes i forbindelse med kateterskift
- De to opløsninger kan kombineres

Inkrustationer

- Inkrustationer skyldes at bakterier i urinen, oftest proteus, producerer enzymet Urease. Urease øger urinens pH-værdi, hvilket giver en udfældning af magnesium og calcium salte. Det medfører kalkbelægninger/ inkrustationer i og på kateteret og giver dermed risiko stop af dette.

* 'Blokker' = to eller flere tilstoppede katetre over 6 uger

Skylleregime ved kateterstop hver/hver anden uge

Uro-Tainer® Twin Suby G: 2 x ugentligt i 2 uger.

Fungerer kateteret som det skal, kan skyllefrekvensen evt. sættes ned. Er der fortsat kateterstop pga. inkrustationer, sættes skyllefrekvensen op. Alternativt skylles med Uro-Tainer® Twin Solutio R i stedet for.

Følg altid de lokale instrukser. Kontakt evt. kontinenssygeplejerske.

Brugsvejledning

- Se bagsiden af dette datablad
- Se www.bbraun.dk for at se videoer der gennemgår praktiske håndtering samt teoretiske viden om Uro-Tainer® Twin. (Urologi/inkontinens/Skyllevæsker/Uro-Tainer®Twin)

OBS!

- Skylning med Uro-Tainer® Solutio R kan i få tilfælde give en let svien. Der kan her evt. efterskylles med NaCl.



Uro-Tainer®
Suby G 3,23%

Uro-Tainer®
Solutio R 6%

Udfordring/ Uro-Tainer® Produkt	Risiko for bakteriel kolonisation i og på katetret	Kateterstop på grund af inkrustationer	Kateterstop, på grund af debris, slim og små rester af blod
Uro-Tainer® Polyhexanid 0,02%	Rutinemæssig dekolonisering	-	Mekanisk rensning
Uro-Tainer® Suby G (3,23% citronsyre)	-	Forebyggelse og fjernelse af inkrustationer	-
Uro-Tainer® Solutio R (6% citronsyre)	-	Forebyggelse og fjernelse af vedvarende inkrustationer	-

Varenr.	Produktnavn	Salgsenhed pr. æske
9746609	Uro-Tainer® Twin Suby G 3,23 % citronsyre, 2 x 30 ml,	10 stk.
9746625	Uro-Tainer® Twin Solutio R 6 % citronsyre, 2 x 30 ml,	10 stk.

Uro-Tainer® Twin

Middel til vedligeholdelse af permanente urinkatetre – dobbelt skylning



1. Emballagen åbnes, og Uro-Tainer® Twin tages ud.



2. De to klemmer (grøn og hvid) til Uro-Tainer® Twin kamrene lukkes



3. Fjern forseglingen fra hættten.



4. Drej og træk hættten af uden at berøre den sterile konnektor. Åbn for den hvide klemme* og tillad få dråber af væsken at løbe op i slangen for at fjerne evt. luftbobler i denne. Luk klemmen igen.

** Da indholdet i de to kamre er identisk, og væsken fra begge kamre skal anvendes til skylning af katetret, er det uden betydning, om den hvide eller grønne klemme anvendes først, så længe instruktionen følges.*



5. Indfør konnektoren i katetret. Dermed kobles Uro-Tainer® Twin posen til katetret.



6. Hold Uro-Tainer® Twin over blæreniveau, åbn den hvide klemme og lad væsken fra det første kammer løbe ind gennem katetret. For at undgå gener i blæren tving eller pres *ikke* væsken ind. Lad i stedet væsken løbe ind med tyngdekraftens hjælp. Efter indløb luk for den hvide klemme for at blokere for tilbageløb.



7. Efter 5 minutters virketid åbnes den hvide klemme, posen holdes under blæreniveau, og den brugte opløsning løber ud. Luk for slangen med den hvide klemme. Afbryd ikke forbindelsen mellem posen og kateteret.



8. Gentag processen ved denne gang at benytte det andet kammer (grøn klemme).



9. Sørg for at begge klemmer er lukkede. Fjern konnektoren fra katetret ved at dreje den forsigtigt rundt. Urinposen tilsluttes, og Uro-Tainer® Twin posen kasseres efter brug. Posen må gerne tømmes i toilettet. Kun til engangsbrug.