


# Urinocol®

Fig.1

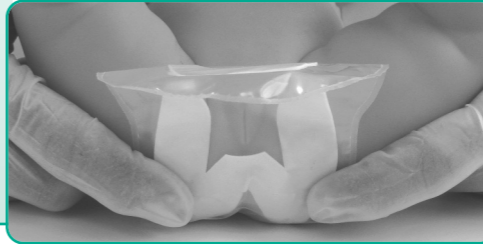

Paediatric Closed	Weight	Ref	Content
	>2500g	227550*	100 Pcs.
	>2500g	227549*	20x1 Pcs.
	>2500g	227560*	100 Pcs.
	>2500g	227559*	20x1 Pcs.
Paediatric Drainable	Weight	Ref	Content
	>2500g	227546*	50 Pcs.
	>2500g	227547*1	50x1 Pcs.
	>2500g	227566*	50 Pcs.
	>2500g	227567*1	50x1 Pcs.
Premature	Weight	Ref	Content
	Standard 1200-2500g	227571*	50 Pcs.
	Mini <1200g	227570*	50 Pcs.
	Standard 1200-2500g	227573*	50 Pcs.
	Mini	227572*	50 Pcs.

\* For each country, a specific letter is added at the end of the reference  
 1 In France only

- DE** Distribué par B. Braun Medical NV/SA 1831 Diegem - Belgium
- ES** Vertrieb B. Braun Melsungen AG-OPM 34212 Melsungen - Germany
- FR** Distribuido por B. Braun Medical SA, 08191 Rubi - Spain
- IT** Distribué par B. Braun Medical S.A.S. 92107 Boulogne Cedex France
- UK** Distributed by B. Braun Medical Ltd Sheffield, S35 2PW - United Kingdom
- PL** Distribuïto da B. Braun Milano S.p.A 20161 Milano - Italy
- NL** Gedistribueerd door B. Braun Medical B.V., 5342 CW OSS - Netherlands
- AT** Vertrieb B. Braun Austria GmbH 2344 Maria Enzersdorf - Austria
- CH** Distribué par B. Braun Medical AG 6203 Sempach - Switzerland
- CZ** Dováží B. Braun Medical, s.r.o. 148 00 Praha 4 - Czech Republic
- DK** Distribúes af B. Braun Medical A/S 08191 Rubi - Denmark
- FI** Myyjä B. Braun Medical Oy 00350 Helsinki - Finland
- PT** Distribuïdo por B. Braun Medical Lda 2730-053 Barcarena - Portugal
- SE** Distribúerat av B. Braun Medical Oy 182 12 Danderyd - Sweden
- SK** Distribútor B. Braun Medical s.r.o. 851 01 Bratislava - Slovakia

CE 0123



B. Braun Medical  
 204, avenue du Maréchal Juin  
 92107 Boulogne cedex - France

**B | BRAUN**

N0066 - 04-2011

# Urinocol®





Steril, selvklebende opsamlingspose til opsamling af urin. Anvendes indenfor pædiatrien i forbindelse med diuresemåling, til biokemiske, cytostatiske eller bakterielle undersøgelser.

**ADVARSEL:** Kontroller at opsamlingsposens størrelse passer til barnets vægt.

- Vask hænderne grundigt.
  - Læg barnet på ryggen.
  - Rengør forsigtigt huden med vand og en neutral sæbe. Antiseptiske midler må kun anvendes såfremt det er medicinsk foreskrevet. Huden skal være ren, tør og fri for creme eller pudder. Huden må ikke være irriteret.
  - Fjern det midterste og udstansede stykke af klæberen. Kassér dette.
  - Fjern forsigtigt dækkpapiret fra klæbefladen.
  - Placer opsamlingsposen omkring barnets penis eller vulva, og tryk forsigtigt hele vejen rundt på kanterne for at sikre at opsamlingsposen slutter til (Fig.1).
  - Til tåmbare urinposer: Før posen sættes på huden, kontrolleres at udløbet er lukket korrekt.
- Udløbet er specielt udviklet til:
- direkte prøvetagning via sprøjte (a)
  - at passe til universal konus (b)
- For at fjerne opsamlingsposen, løft op i det ene hjørne og træk forsigtigt af.
  - Fold klæberen for at undgå urinspild fra posen. Påsæt evt tape.
  - I forbindelse med biokemiske, cytostatiske og bakterielle undersøgelser, bør opsamlingsposen ikke anvendes mere end 30 minutter, for derved at undgå risiko for urinkontaminering (falsk positiv). Selvom opsamlingsposen er tom, skal den skiftes. Urinen skal sendes til laboratoriet indenfor 2 timer efter opsamling. Såfremt dette ikke kan lade sig gøre, kan prøven opbevares i køleskab i maksimum 12 timer. Noter opsamlingsstidspunktet på posen.
  - I forbindelse med diuresemåling, skift opsamlingsposen efter.

# Urinocol®

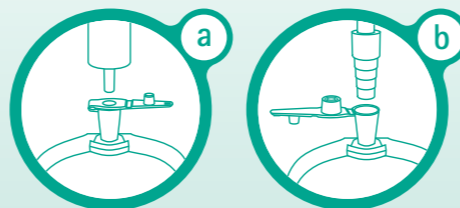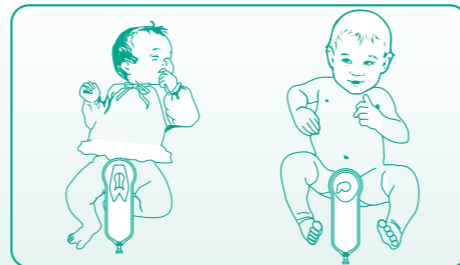

# Urinocol®



- EN** Instructions for use
- DE** Gebrauchsanweisung
- ES** Instrucciones de uso
- FR** Mode d'emploi
- IT** Istruzioni per l'uso
- NL** Gebruiksaanwijzing
- CS** Návod k použití
- DA** Brugsvejledning
- FI** Käyttöohjeet
- PT** Instruções de uso
- SK** Návod na použitie
- SV** Bruksanvisning

**B | BRAUN**