

Ecolav Varenr. 3570300 30 ml Ecolav Varenr. 3570340 100 ml



DK - Brugsanvisning

Skyllevæske, steril og endo-
toksinfri

Indhold

1000 ml indeholder:

Natriumklorid 9,00 g

Aqua ad iniectabilia

til 1000 ml

Elektrolytter: mmol/l

Na⁺ 154

Cl⁻ 154

Indikationer

Til skylning og rensning un-
der kirurgiske indgreb

Til skylning af sår og brand-
sår

Til fugtning af sårtapona-
der, klæde og forbindinger

Til skylning og rensning af
blærekatetre

Til skylning og rensning ved
stomabehandling

Til skylning og rensning af
instrumenter og udstyr

Til intra- og postoperativ
skylning (endoskopindgreb
uden HFstrøm, efter TUR-
indgreb)

Til fyldning af respirations-
luftbefugtere (brug af be-
holder på 100 ml eller større
anbefales)

Til mekanisk skylning af øj-
nene (brug af beholder på 30
ml anbefales)

Til næseskylning (brug af be-
holder på 30 ml anbefales)

Dosering

Mængden af væske afhæn-
ger af situationen.

Overdosering

Overdosering i forbindelse
med sårskylning og intra-
operativ applikation kan
føre til absorbering af skyl-
levæsken, hvilket kan føre
til hypervolaemia i form af
hypoton hyperhydratation.

Hovedpine, rastløshed og
disorienteret er sympto-
mer på hyperhydratation.

I svære tilfælde kan coma-
lignende stadier forekomme.

Modtræk i tilfælde af overdosering

Afbrud skylningen. Korrek-
tion af væske- og elektrolyt-
balancen afhængig af den
specifikke kliniske situation.

Advarsler og forsigtighedsregler

Må ikke anvendes til in-
fusion. Må kun anvendes
såfremt væsken er klar, og
plomberingen er ubrutt. Abne
beholdere må ikke
gemmes. Overskydende væ-
ske skal fjernes. Genanven-
delse af engangsremedier
medfører en potentiel risiko
for patienten og brugeren.
Det kan føre til kontami-
nering og/eller reduceret
funktion. Kontaminering
af og/eller reduceret funk-
tion i remediet kan medføre
skade, sygdom eller død for
patienten. Opbevares util-
gængeligt for børn. Hvis
der er risiko for absorption
af større mængder væske,

NaCl 0,9% B. Braun

som det kan være tilfældet,
hvis opløsningen anvendes
i store legemshuler eller på
store såroverflader, må op-
løsningen ikke anvendes til
hyperhydrerede patienter.
Under sådanne forhold skal
opløsningen anvendes med
forsigtighed til patienter
med

- Hypertonisk dehydrering,
 - Hyperkaliæmi,
 - Hypernatriæmi,
 - Hyperkloræmi, Lidelser,
- hvor begrænsning af na-
triumindtagelse er indice-
ret, såsom hjerteinsuffi-
ciens, generaliseret ødem,
lungeødem, hypertension,
eklampsi, svær nyreinsuf-
ficiens.

NaCl 0,9% B. Braun må
ikke anvendes til intratekale
skylningsprocedurer.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Anvendes inden

Se beholderens etiket

Dato for sidste revision

0310

